




# 泰滑乐<sup>®</sup>

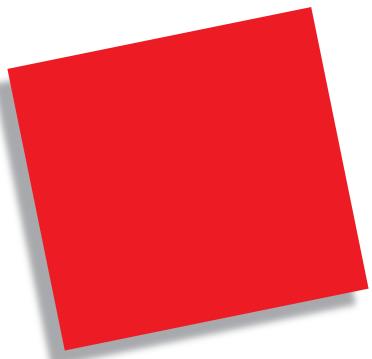

让护理变轻松，让护理更舒适。



- 1.可以简单地进行清洗和消毒。
- 2.使用了特殊材料，所以更滑更牢固。
- 3.可以用于各种体位变换，减轻护理的繁重负担。
- 4.可以减少护理中摩擦力的产生。

产品名称	尺寸 (cm)	材质
泰滑乐 <sup>®</sup>	145X145	100%尼龙

来自泰已科的α PLA  
关注健康，减轻护理负担

Together

我们在一起



α PLA<sup>®</sup>  
アルファグラ


# ● 使用方法

\* 请对折后使用

## 1 铺设方法



将泰滑乐对折，铺入护理对象和床垫之间。

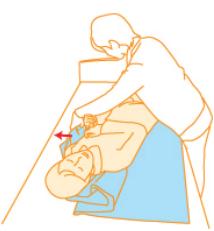

注意护理对象的头底下也要铺上泰滑乐。

## 2 取出方法



抽出时，请一只手扶住患者，从头部和腿部两边缓缓抽出，请注意抽泰滑乐的下面一层。



## 3 往上移动

一个人操作时



双手推动患者大腿根部或臀部，将其移到正确位置。



利用两层泰滑乐之间的滑动来完成向上的移位。


两个人操作时



抓住双层泰滑乐上边一层的左右两边，利用两层泰滑乐之间的滑动来上移。

**POINT** 为防止患者头碰到床头板，请注意枕头的摆放位置。

## 4 左右翻身

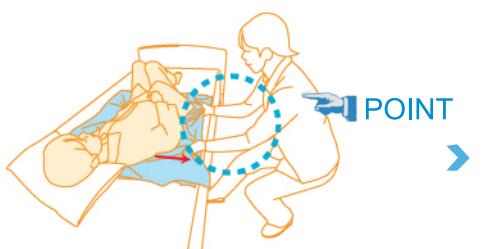

双手抓住泰滑乐的上面一层往自身方向平拉。



然后缓缓向上方提拉，将患者身体轻轻侧翻。

**POINT** 双腿下蹲，手臂与床平行操作。

### ● 日常清洗处理

- 1 请用40°以下的水温，用洗衣机弱洗进行清洗。
- 2 请使用中性洗涤剂。
- 3 拉平后，避免阳光直射，阴干。



### ● 使用注意事项

- 1 采用滑动材料，使用不当时会有跌落的风险。
- 2 使用时，一定要有专业护理人员在场。
- 3 请不要接近电吹风等高温物品。

泰已科(上海)国际贸易有限公司

<http://www.taica-sh.com.cn>

021-6415-6780