

1、为了让您放心使用 安全注意事项



无视该事项，错误使用后，有可能会造成人体受伤，请务必遵守以下事项：

在使用本产品时，请咨询医生、护士、护理专家后正确使用。此外，防褥疮并不能单靠本产品，同时需要结合必要的护理。

如患者已经出现褥疮症状，必须根据专业医生的指示才可使用本产品。此外，在使用过程中，一旦身体出现任何不适或不安时，请立即停止使用，并去专业医生那里就诊。

请购买适合床幅宽的尺寸，避免将身体夹在防褥疮垫和床两旁的轨道或护栏之间的空隙中，因为有可能由此造成挤压而受伤。

床套所使用的是为防止褥疮的恶化、减少摩擦和擦伤的一种特殊材料。当患者要坐在床边时，护理员可帮助扶正其身体，并让患者扶住床的护栏。

禁止以任何激烈的外力作用于本产品（例如抛掷物体或在床上跳跃等）。否则会因此引起床垫的反弹导致受伤。



无视该事项，错误使用后，可能会造成人体受伤，以及物体损坏，以下是其相关内容：

本产品作为综合性褥疮护理用具之一，并不意味着患者可以不必变换体位。请在使用本产品的同时加入辅助体位变换的护理。

禁止将反面朝上使用本产品。那样将起不到分散体压的效果，甚至有可能导致褥疮发生。正反面的识别方法：外套无Logo的一面为反面，请放在下方。

请不要在本产品上铺设过厚的床单和其他物品，那将影响本产品的体压分散效果，甚至还可能导致褥疮的发生。

请注意不要使用别针等突起物以免刺破本产品。

对于特别容易出汗的患者朋友，在使用本产品时，请经常变换体位以及使用空调进行温度调节，并建议定期对床套进行清洗。

床套清洗后，请避免阳光直射，应平铺在阴凉处晾干。

请远离明火（包括烟头）及烘干机、烤炉等高温物体。

本产品内部禁止清洗。

不要施强力于本产品（例如：强硬抓握、拉扯、扭拧等），那样可能会导致产品的损坏以及影响使用寿命。

使用摇床时，请注意倾斜度超过30度以上时，不宜长时间使用。超过本产品的使用范围，上扬时所产生的压迫力会增大摩擦力，有可能导致褥疮的发生。如确有需要将床升起30度角以上使用的话，请遵照医生、护士、护理专家等的建议，采用最合适的姿势和时间来使用。

泰匀端®

海绵防褥疮垫

T-PLA-F91 / T-PLA-F83

（使用说明书）

产品备案凭证编号：浙甬械备 20200003号

生产备案凭证编号：浙甬食药监械生产备20200022号

产品技术要求编号：浙甬械备 20200003号

2、规格和使用说明

产品规格: T-PLA-S91; T-PLA-S83; T-PLA-SH91;
T-PLA-SH83; T-PLA-F91; T-PLA-F83;
T-PLA-SF91; T-PLA-SF83

结构组成: 由非电动硬质海绵床垫和床垫外罩组成。利用材质特性,人体躺下后不会处于完全陷落或被包裹的状态,达到预防压疮的效果。海绵防褥疮垫分别由一层或三层不同硬质海绵之分,床垫外罩上装有拉链,可拆和擦洗。

外观: 海绵防褥疮垫芯应颜色均匀,可有轻微杂色;不应有明显污染,无刺激性气味;床垫外罩缝边应牢固规整,表面不应有褶皱、褪色、跳线和破损等缺陷;拉链应开合顺畅。

适用范围: 用于术后或长期坐卧患者,预防和缓解压疮。

使用说明:

1. 使用前,请仔细阅读本说明书。
2. 打开包装,确认产品包装是否完整,产品的型号/规格是否合适。
3. 三层床垫产品正反面的物理性能各不相同,请确认后必须使用正面。
4. 把确认后的产品直接置于患者的卧床,即可使用。在患者使用时禁止移动本产品。由此可能造成摔伤。


禁忌症:

1. 患脊柱损伤,遵医嘱慎用。
2. 已经患有褥疮或褥疮恶化的患者,遵医嘱慎用。


⚠ 在使用前,请务必确认床垫有无划破、开线、污损、拉链损坏等现象。产品有严格的品质管理下生产,如果发现此类现象,请您立即和我们联系。

3、搬运方法

⚠ 请不要抓握床垫搬运,那样可能会损坏床垫。正确的方法是用两手夹持搬运。

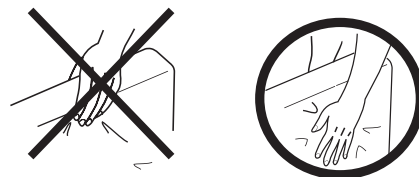

⚠ 禁止弯曲使用和保管本床垫,因有可能造成内部结构的损害。

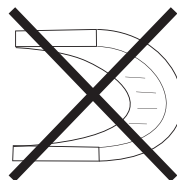

⚠ 由于使用不当所引起的产品损坏或不良后果,代理商、制造商和泰已科公司都一概不负责任。

4、日常清洗处理

请使用中性洗涤剂清理床套,本床垫内部禁止清洗。当您在清洗床套时,请务必注意以下事项:



请在水温60度以下水洗。



不可以使用含有氯素的漂白剂进行清洗。



不可以使用电熨斗熨干。



不可以用强力绞干,由此可能造成床套变形。



避免阳光直射,请平铺在阴凉处予以晾干。

5、保管方法

长时间不用时,请遵照下述方法保管。

⚠ 请打扫干净后,在保持清洁的状态下进行保管。

贮存条件: 应贮存在常温、常湿、无腐蚀性气体和通风良好的室内

使用期限: 7年。

标签说明:

1. 注意阅读使用说明书标志 ⚠
2. 生产日期或批号标志  
3. 使用期限 
4. 未灭菌

使用说明书的编制日期: 2020-1-6

备 案 人: 浙江东洋佳嘉海绵制品有限公司

住 所: 浙江省宁波市慈溪滨海经济开发区淡水泓二路519号

生产企业: 浙江东洋佳嘉海绵制品有限公司

生产地址: 浙江省宁波市慈溪滨海经济开发区淡水泓二路519号

邮 编: 315331

电 话: 0574-8757-0057

售后服务: 泰已科(上海)国际贸易有限公司

联系电话: 021-6415-6780

总经销: 泰已科(上海)国际贸易有限公司

上海市长宁区延安西路2201号2315室

邮编: 200336

TEL 021-6415-6780