

保管方法

- 请保存于湿度较低的地点。
请勿在床垫上放置重物,防止床垫变形。
- 长时间不用时,请遵照下述方法保管。
请打扫干净后,在保持清洁的状态下进行保管。
- 保管条件:应贮存在常温、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

关于废弃

- 废弃本产品时,请遵守当地规定。
- 配送本产品使用的包装材料可作为一般垃圾废弃处理。

退换货

- 收到本产品后请立即确认本产品是否有问题。
- 如本产品存在质量问题,请联系泰已科(上海)国际贸易有限公司或销售点。

商品规格

● 材质

填充材料:	聚氨酯泡沫
-------	-------

● 外罩

表 面:	聚氨纤维57%·棉43%
隔 层:	聚氨纤维100%
底 部:	聚氨纤维92%·棉8%

● 型号

● 尺寸

T-PLA-SF83	195x83x3cm
T-PLA-SF91	195x91x3cm

海绵防褥疮垫

泰静爽™

T-PLA-SF83 T-PLA-SF91



使用说明书

使用前请务必阅读本说明书

Taica

泰已科(上海)国际贸易有限公司
上海市长宁区延安西路2201号2315室
Tel: 021-6415-6780

产品备案号: 浙甬械备 20200003号
生产备案号: 浙甬食药监械生产备20200022号

产品使用注意事项

为了能让您安全放心使用本产品,请务必遵守以下各项。



针对忽视该标识,错误使用本产品所导致人员重伤的可能性进行警示。

请勿在本产品上做心肺复苏等对身体施加外力的动作。本产品会分散压力,可能导致处理措施实施不到位。

请勿让人员躺在本产品上直接移动本产品。该行为可能导致跌落受伤。

注意勿将手夹在床沿侧面轨道、辅助扶手等与本产品的缝隙中,该行为可能导致受伤。



针对忽视该标识,错误使用本产品所导致人员受伤的可能性进行提醒。

若误将本产品正反面颠倒使用,可能无法发挥本产品性能。

请勿在本产品上面铺设过厚褥子等,否则将影响体压分散功能。

请勿用力拉扯本产品边缘,否则造成内部结构损伤。

易出汗者使用时,请经常变换体位,适当打开空调。另外请适当更换清洗床单、薄褥子。

长时间铺垫容易积累湿气,因此请定期检查、保持室内通风。

由于泡沫材料本身特性的原因,日久可能会产生变色,但性能上无任何影响。

请避免阳光直射。否则将导致本产品变形。

请勿将本产品靠近高温物品(吹风机、暖炉、熨斗等)以及低温物品(干冰等),否则会导致变形。

请勿让本产品靠近火源或高温物品,否则可能引起火灾。


不要对本产品强加外力(用力抓握、抻拉、拧转尖锐物刺碰等)。

使用本产品前确认事项


- 使用前务必确认本产品无划伤、破损、污渍等。
- 本产品刚开封时可能会有聚氨酯泡沫的气味,但其中并不含对人体有害的物质。经放置一段时间该气味就会自然消失,请放心使用。

使用方法及保养的注意事项


- 使用时,请将固定带解开,留出床垫反面的魔术贴纸。

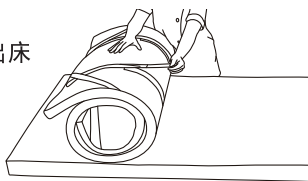

- 请将带有“泰安爽”名牌的一面向上,放置在普通床垫上面使用。

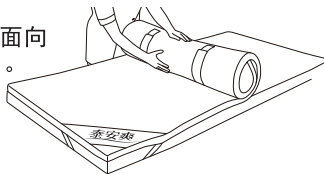

- 请将装有弹力皮筋的四个角固定在上面的床垫上。

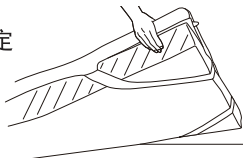

- 请勿用力拉扯产品边缘,防止产品破损。



- 请使用伸缩性强的床单。
- 如有失禁,可以同时使用防水床单。
- 请勿躺在本产品上直接移动或搬动本产品,该行为可能导致跌落造成受伤。
- 每次使用本产品后,材料会慢慢适应身体变软。使用初期有明显感觉,这是聚氨酯泡沫材料的一大特点,并非性能问题。
- 主要承重部分比其他部分更软,这是正常现象,并非功能问题。

清洗方法

【床垫外罩的清洗方法】

- 在清洗本产品外罩时,需要注意以下几点。

	水洗温度不能高于30度
	不能用漂白剂清洗
	洗涤后阴凉处悬挂,自然干燥,禁止阳光直晒
	不能熨烫
	不能烘干
	可用石洗类或氯素溶剂清洗

【床垫主体的清洗方法】

- 使用干毛巾或拧干的湿毛巾擦拭污渍处,注意不要直接擦拭,而是呈敲打状,并在彻底晾干后使用。
- 酒精及腐蚀性漂白剂会加速床垫的老化,请勿使用。
- 定期在通风良好的阴凉处竖放床垫,使其干燥。
- 海绵发泡垫本身禁止水洗。