

泰舒昂 体位胶垫

使用方法简单易学
多种形状可供选择




拱桥型

尺寸：约70×30cm



波浪型

尺寸：约60×70cm

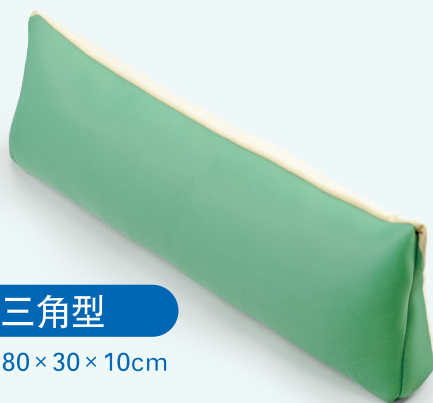

大三角型

尺寸：约80×30×10cm



小三角型

尺寸：约20×40×20cm

泰舒昂 体位胶垫系列产品

内部材料 聚苯、乙烯胶粒聚酯棉

外套 表面 100% 聚酯、底面 100% 聚酯

泰舒昂 体位胶垫的用途

目的

保持舒适体位

分散身体压力

预防发生压疮

适用于侧卧、坐姿等多种姿势的身体定位

由专业理疗师参与设计开发。

使用具有体压分散功能的床垫时，如果患者不是处于平躺状态，就无法充分发挥分散体压的效果。

同时，特别推荐驼背、关节挛缩、偏瘫、身体瘦弱者使用体位胶垫。可以通过扩大支撑面积，分散身体压务。




Taica

泰已科(上海)国际贸易有限公司

细小的流动性颗粒 + 软硬适中的棉材质 = 最理想的定位效果

本公司体位胶垫的内部材料采用细小的特殊材质胶粒，配合优质棉，按照精心设计的比例填充。借助细小胶粒的流动性，令定位垫紧密贴合身体各个部位的缝隙。优质棉起到了很好的体位支撑性。该系列产品中包括各种不同形状的体位胶垫，快来亲身体验一下它的方便性吧！

面料具有良好的透气

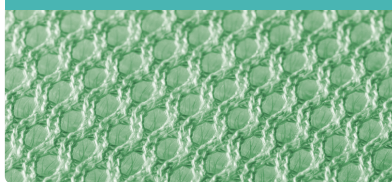

采用了透气型极佳的 3D 立体结构

紧密贴合身体



留有一定空间的精准填充比例，便于自由调节形状

特有的内部材料



采用细小的特殊材质胶粒，配合优质棉，按照精心设计的比例填充

您可以这样使用 泰舒昂 体位胶垫

支撑身体



所用
体位胶垫

侧面为大三角形、小三角形2种体位胶垫

效果

30度侧卧位的体位固定

分散体压



所用
体位胶垫

拱桥型、波浪形、大三角形、小三角4种体位胶垫

效果

在身体无法接触到床垫的部位，垫入体位胶垫通过增大身体的支撑及接触面积，达到分散身体压力的作用。

保持姿势



所用
体位胶垫

侧面2个小三角形体位胶垫

效果

令背部完全贴合轮椅

舒缓紧张

所用
体位胶垫

拱桥型体位胶垫

效果

支撑上肢，令坐姿更加舒适